

# Lertal<sup>®</sup>

Sprej za oči

Za život bez alergije




Alergijski konjuktivitis je čest klinički problem koji se najčešće očituje simptomima suzenja i svrbeži očiju.

Ovi simptomi pogađaju oko 40% odrasle populacije i u značajnoj mjeri utječu na svakodnevne aktivnosti pacijenata.

**Lertal® sprej za oči klinički dokazano smanjuje simptome alergijskog konjuktivitisa.**

Studija provedena na 30 pacijenata sa potvrđenim alergijskim konjuktivitisom, koji je trajao najmanje godinu dana (pozitivan kožni test ili RAST) i koji su koristili Lertal sprej u periodu od četiri tjedna je pokazala:

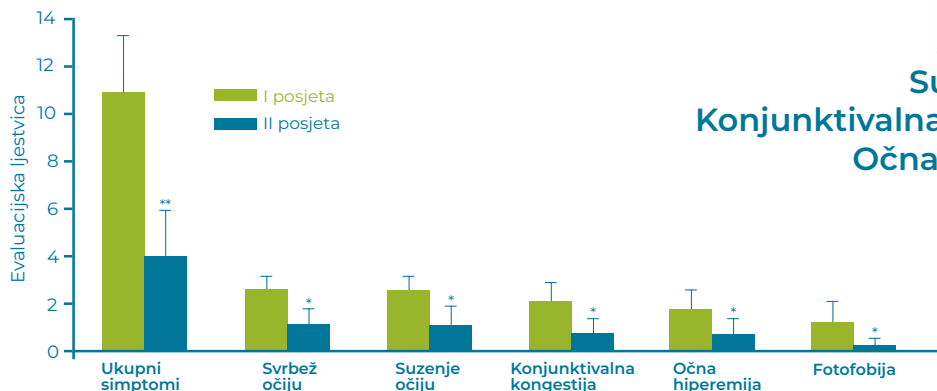

Svrbež očiju: **-58 %**  
Suzenje očiju: **- 53 %**  
Konjunktivalna kongestija: **- 63 %**  
Očna hiperemija: **- 63 %**

Evalvacijska ljestvica: 0=bez simptoma; 1=blagi simptomi; 2=umjereni simptomi; 3=teški simptomi. \*P<0.001. \*\*P>0.001 vs. početak

Smanjenje ukupnih očnih simptoma za **63%** nakon samo **mjesec dana** terapije, osigurava značajno bolju kvalitetu života pacijenata sa alergijskim konjuktivitisom.

# Lertal®

Sprej za oči

Raspršiti na zatvoreno oko

## Hijaluronska kiselina 0,3%

- ✓ Visoka koncentracija hijaluronske kiseline osigurava **brzo djelovanje** na alergijsku simptomatologiju očnih kapaka.
- ✓ Stabilizira suzni film čime osigurava **bolju hidrataciju i lubrikaciju** oka.



Obnavlja lipidni sloj  
suznog filma



## Liposomi 5%

Transportira Perillu  
na površinu rožnice



## Perilla 0,5%

Klinički dokazana antialergijska učinkovitost

- ✓ Zaustavlja oslobađanje histamina
- ✓ Snižava razinu IgE
- ✓ Smanjuje infiltraciju inflamatornih stanica





# Lertal<sup>®</sup>

Sprej za oči

Raspršiti na zatvoreno oko 3 – 4x dnevno

**Brzo rješenje za očne simptome alergijskog konjuktivitisa, suhih, nadraženi i crvenih očiju.**

Lertal sprej je sterilna oftalmološka otopina koja sadržava natrij hijaluronat i suhi ekstrakt sjemena crne koprive (*Perilla frutescens* B.). Uslijed svog svojstva kojim umiruje, osvježuje i vlaži suhe, nadražene i crvene oči – primjenjuje se kao nadopuna antihistaminske terapije. Udruženo djelovanje lipozoma i natrij-hijaluronata (soli hijaluronske kiseline) pomaže pri obnovi i poboljšanju stabilnosti lipidnog sloja suznog filma, održavajući hidriranom i vlažnom površinu oka.

Zahvaljujući svojim svojstvima, suhi ekstrakt *Perilla-e* pomaže pri olakšavanju simptoma očne nadražnosti.

**Namjena:** Koristi se kao dopuna u terapiji alergijskog konjuktivitisa; daje osjećaj olakšanja kod suhih, nadraženi i crvenih očiju: osvježava i olakšava simptome iritacije oka, sprječava dehidraciju površine oka, uspostavlja homeostazu površine oka i suznog filma.

**Uputa za uporabu:** Prije uporabe, dobro operite ruke. Čvrsto držite bočicu a palac ili kažiprst postavite na mlaznicu vodeći računa da ne zatvorite otvor koji je na njoj. Bočicu udaljite približno 10 cm od oka. Jakim potiskom na mlaznicu raspršite otopinu na zatvoreno oko. Raspršite otopinu jedanput ili dva puta prilikom svake primjene. Uporaba ovog proizvoda se preporuča tri ili četiri puta dnevno tijekom 3 – 4 uzastopna dana. Prije nanošenja ovog proizvoda, skinite kontaktne leće.

**Upozorenje:** U slučaju preosjetljivosti na neki od sastojaka, nemojte koristiti ovaj proizvod. Proizvod se može koristiti najviše 28 dana od prvog otvaranja bočice.

**Sastav:** PER-LIP, natrij-hijaluronat, dinatrij-edetat, PHMB, PEG-400, borna kiselina, natrij-tetraborat, voda.

**Referenca:** Renato Ariano – InFocus – Ophtalmic Lertal spray for seasonal allergic conjunctivitis: an open-label clinical study – Year XX, N.10

**Proizvođač:** NTC, Srl, Via Luigi Razza 3, 20124 Milano, Italija

**Broj rješenja o registraciji:**

**Ovlašteni predstavnik:** EBOR pharma j.d.o.o. Zagreb



**EBORpharma j.d.o.o.**  
Heinzlova 62, 10000 Zagreb  
tel. +385 (0)1 645 89 45  
e-mail: info@eborpharma.hr  
www.eborpharma.hr

